

# Recommandations PHYSIODYNA avant l'installation sur PC - V1.0

29.07.21

1. Vérifier la compatibilité de l'ordinateur avec le logiciel
  - 1.1. RAM : Mini-Minimum 4Go
  - 1.2. Processeur : Mini-Minimum Core i3
  - 1.3. Windows 10
  - 1.4. Taille de l'écran 15"
  - 1.5. Carte (connexion) Bluetooth si vous voulez utiliser une sonde Bluetooth (sans fil)
2. Vérifier la présence d'un lecteur pdf (Adobe ou autre...)
3. Vérifier si Java est installé
4. Vérifier (si vous voulez faire les bilans de grossesse) si Excel est installé
5. Installation
  - 5.1. Créer un répertoire "BIOSTIM" dans les "documents"
  - 5.2. Copier le logiciel d'installation (contenu de la clef USB ou du fichier de téléchargement)
  - 5.3. Retirer la clef USB (si le logiciel provient d'une clef USB)
  - 5.4. L'installation va se faire depuis les fichiers que vous venez de copier dans le répertoire "BIOSTIM" que vous venez de créer dans "documents".**
    - 5.4.1. Procéder à l'installation des pilotes (drivers) depuis le répertoire "Drivers" en cliquant 2 fois sur le fichier "CDM21228\_Setup".
    - 5.4.2. Si Java n'est pas installé sur votre ordinateur, procéder à l'installation de Java depuis le répertoire "Drivers" en cliquant 2 fois sur le fichier "jre-8u251-windows-i586". Si vous n'êtes pas sûr si Java est installé ou pas, procédez tout de même son l'installation.
    - 5.4.3. Si vous n'avez pas de lecteur pdf installé, installez Foxit Reader qui se trouve dans le répertoire "Drivers" en cliquant 2 fois sur "FoxitReader941\_L10N\_Setup\_Prom". Attention, refuser Foxit Phantom durant l'installation.
    - 5.4.4. Terminer l'installation en cliquant deux fois sur le fichier "installation" qui se trouve dans le répertoire "BIOSTIM"
  - 5.5. Arrêter l'ordinateur.
    - 5.5.1. Branchez correctement le BIOSTIM sur l'ordinateur avec tous les câbles et mettez-le en fonction.
    - 5.5.2. Mettez l'ordinateur en fonction.
    - 5.5.3. Quand il est stable, cliquez 2 fois sur l'icône BIOSTIM qui se trouve sur le bureau.
    - 5.5.4. Quand le BIOSTIM est ouvert, vérifiez la version en haut à gauche et si la "petite maison" à gauche est verte. Cela indique si l'ordinateur est bien connecté au dispositif.
    - 5.5.5. Si vous êtes connecté au WI-Fi, le petit nuage doit être vert aussi.

